

Vadlīnijas aizsargmasku lietošanai un atsauksmēm par kvalitāti

I


Saņemot sejas aizsargmaskas – atvērt kastītes iepakojumu un vizuāli novērtēt, vai masku fiksējošas aukliņas ir klāt pie maskas un nav notrūkušas.

II

Ieteikumi aizsargmaskas lietošanai



Pirms aizsargmaskas uzlikšanas jānomazgā vai jānodezinficē rokas.

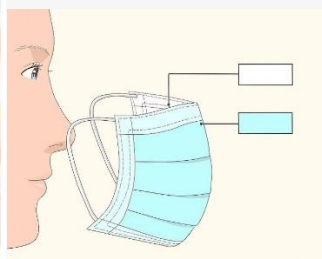

Aizsargmaska jāliek uzmanīgi, lai tā pilnībā nosegtu seju no deguna līdz zodam.

Pārliecinies, ka aizsargmaskas krāsainā vai zilā puse vērsta uz āru.

Pārliecinies, ka maskas mala, kurā iestrādāta metāla stieple, cieši pieguļ virs deguna.

Lietošanas laikā neaiztīc aizsargmasku, it īpaši to daļu, kas vērsta uz āru, jo vīrusi un baktērijas lielākoties atrodas uz šīs virsmas.

Aizsargmasku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.

III

Ieteikumi aizsargmaskas noņemšanai

- 1) Aizsargmasku jānoņem uzmanīgi no aizmugures, turot to aiz tās fiksējošajām daļām – aukliņām, lentītēm. Nedrīkst pieskarties aizsargmaskas vidusdaļai un priekšpusei.
- 2) Pēc lietošanas aizsargmaska ir jāizmet slēgtā atkritumu tvertnē.
- 3) Pēc aizsargmaskas izmešanas rūpīgi jānomazgā un/vai jānodezinficē rokas.

IV

Gadījumos ja:

- atverot iepakojumu, vizuāli novērtējot aizsargmaskas iepakojumā, ir redzami aizsargmasku defekti – norautas aukliņas vai citi vizuāli redzami defekti, lūdzam nofotografēt aizsargmaskas ar defektiem un arī attiecīgo iepakojumu;
- aizsargmasku uzmanīgi un pareizi uzliekot, vairākiem aizsargmaskas lietotājiem ir sūdzības par aizsargmaskas fiksējošo daļu – aukliņu notrūkšanu to fiksēšanas vietā pie aizsargmaskas, lūdzam nofotografēt aizsargmaskas ar defektiem un arī attiecīgo iepakojumu.

Ja tiek konstatēti aizsargmasku defekti, sūdzības par masku kvalitāti lūdzam sūtīt uz [e-pastu: kanceleja@mod.gov.lv](mailto:kanceleja@mod.gov.lv) vai zvanīt uz tālruņa numuriem – 67335278 vai 67335168.